

Hızlı rehber

Giriş

Pelvita + birinci sınıf IIa tıbbi cihazdır. Mesane boşaltma bozuklarının veya dışki ve idrar kaçırma durumunun tedavisi için geliştirilmiştir.

Elektrostimülasyon cihazı, pelvik taban kaslarının kontrollü eğitimi ve sfinkter tetring için kullanılır.

Üç zamanlı terapi yöntemleri uygulanabilir
(Gevşetmek, Toplamak)

-Emg Biofeedback eğitimi
(Gevşetmek, Toplamak)

-Elektrostimülasyon
(Elektriksel Stimülasyonla gevşetmek ve toplamak)

-Emg Biofeedback eğitimi ve Elektrostimülasyon Kombinasyonu
(Elektriksel Stimülasyon olmadan gevşetmek ve toplamak, Elektriksel Stimülasyonla gevşetmek ve toplamak)

Önemli Not !

Bu hızlı kılavuz Pelvita+ kullanım talimatlarını tamamıdır. Terapi cihazını kullanmadan önce, kullanım talimatlarındaki tüm tıbbi ve teknik talimatlara uyulmalıdır. Pelvita+, bu tamamlayıcı bilgilerden yola çıkılarak kullanılmalıdır.

Hastalar için kısa talimatlar

İnkontinans tedavisi cihazı kullanım talimatları hakkında ek bilgi.

Pelvita +

Üzerinde Satış :

Firma Heise

Bağlantı soketleri ve kumanda elemanları :

- 1) Sensör soket
- 2) Veri iletim soketi

- 1) Açma ve kapama düğmesi
- 2) Toplamak
- 3) Dinlemek
- 4) Güç kaynağı
- 5) Seçim tuşları + ve -

- 1) Çalışma modu
- 2) EMG/ Güç göstergesi
- 3) EMG Aralığı
- 4) OK düğmesi

Lütfen işaretli talimatlara göre pratik yapın:

Hızlı rehber BF

(Otomatik EMG-Ayarı ile EMG Biofeedback eğitimi)

1. Rektal-Sensör veya vajinal-sensör takın ve cihaza bağlayın
2. Cihazı açın
3. „ BF “modu yanıp sönerse, „ ok düğmesine “ basın
4. Terapi başlamıştı
5. Yeşil ışık „ √ “ yandığında kasları gevşetin
6. Sarı ışık „ / \ “ yandığında, kasları sıkın
7. Tedaviden sonra cihaz kapanır

Hızlı rehber ES

(Elektrostimülasyon)

1. Rektal-Sensör veya Vajinal-Sensör takın ve cihaza bağlayın
2. Cihazı açın

3. Elektrik stimülasyon modu „+“ tuşuyla ayarlayın
4. „ES“ modu yanıp sönerse, „ok“ düğmesine basın
5. Sarı ışık yanıp sönüyorsa, akım „+“ veya „-“ düğmeleriyle ayarlayın
6. „Ok“ düğmesine basın
7. Terapi başlamıştır
8. Tedaviden sonra cihaz kapanır

Hızlı rehber BF+ES

(Otomatik EMG-Ayarlaması ile kombinasyon eğitimi)

- 1.Rektal-Sensör veya Vajinal-Sensör takın ve cihaza bağlayın
- 2.Cihazı açın
- 3.Elektrik stimülasyon ve Biofeedback modu „+“ tuşuyla ayarlayın
- 4.„BF+ES“ modu yanıp sönerse, „ok“ düğmesine basın
5. Sarı ışık yanıp sönüyorsa, akım „+“ veya „-“ düğmeleriyle ayarlayın
- 6.„Ok“ düğmesine basın
7. Terapi başlamıştır
8. Yeşil ışık „∨“ yandığında kasları gevşet
8. Sarı ışık „∧“ yandığında, kasları sıkın
9. Sonra Stimülasyon gerçekleşir
10. Şimdi 8. Nokta ile devam ediyor
11. Tedaviden sonra cihaz kapanır

Sensörün temizlenmesi

Her kullanımdan sonra sensörü akan ılık suyla temizleyin. Çok fazla kirlendiğinde, sabun veya yıkama losyonu kullanın. Sensörü yumuşak bir bezle kurulayın ve sonra bir beze sarın. Çünkü plastik torbalar mikrop geliştirebilir. Fişi ıslatmayın. Aşındırıcı temizlik maddeleri kullanmayın. Kontak elektrotları rahatsız edilebilir.